

BLANCONE®

CLICK⁺

Gentile Professionista!

**Prima di iniziare ad usare CLICK⁺
per la prima volta,
guarda il video tutorial.**

<https://news.blancone.eu/click-plus-istruzioni>



Un sorriso più bianco in pochi minuti

CLICK⁺ è uno sbiancamento in studio veloce e gentile sullo smalto che illumina immediatamente il sorriso

- con l'attivazione della lampada fino a 15 minuti



Senza sensibilità o dolore ai denti

CLICK⁺ usa una bassa concentrazione di perossido di carbamide (17%).

**CLICK⁺ non danneggia lo smalto
e non causa sensibilità o dolore.**



Tooth rejuvenation™: fortifica e protegge i denti

Durante lo sbiancamento con **CLICK⁺**,
il rilascio di calcio e ioni di fosfato migliora l'effetto
della nanoidroassapatite nanoXim, permettendogli di legarsi
chimicamente allo smalto, riempiendo le micro fratture,
e correggendo la trasparenza dello stesso.
Come risultato, lo smalto è ringiovanito, più forte e remineralizzato.
Ripristina la luminosità naturale del dente
e aiuta a prevenire carie e sensibilità.



Clean&White - fa bene ai tuoi denti

CLICK⁺ è studiato per essere eseguito
dopo la seduta di igiene dentale professionale,
**donando al paziente un sorriso più pulito, salutare,
bianco e forte in un'unica seduta.**

Il concetto Clean&White rende l'appuntamento gratificante
e offre al paziente una prima facile esperienza
con i trattamenti BlancOne.


Guida introduttiva rapida

1. Rimozione dei depositi e del biofilm




NON utilizzare pasta per profilassi o prodotti contenenti fluoro.

2. Rileva il tono di luminosità

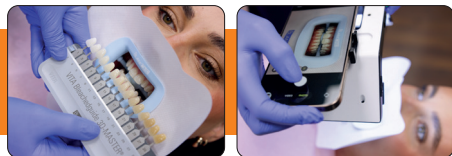

Determina il tono di luminosità prima e dopo il trattamento sbiancante usando la Scala colori Vita e riportalo sulla scheda paziente

3a. Rimuovi il tappo e inserisci il puntale

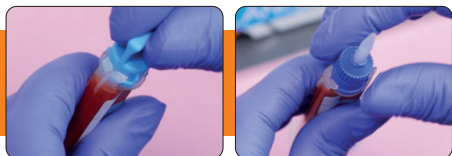

Rimuovi il tappo azzurro e tienilo da parte. NON BUTTARLO VIA.

3b. Estrudi il gel sbiancante dal puntale.




Continua a estrarre fino a quando il gel sbiancante inizia ad essere omogeneo e con un colore uniforme.

3c. Applicazione del gel



Non necessita di protezione gengivale. Applica uno strato di 1-2mm

3d. **IMPORTANTE! NON SPINGERE IL PISTONE DELLA SIRINGA INDIETRO DOPO AVERLO EROGATO**

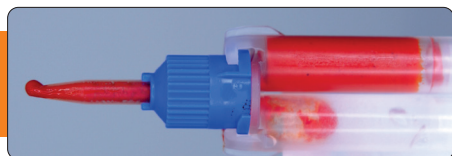

SE SUCCEDDE, IL GEL NON PUÒ PIÙ ESSERE UTILIZZATO. Dispose of the used tip after applying the whitening gel. The tip cannot be reused.



Se il gel fuoriesce dagli ugelli dopo aver rimosso il puntale automiscelante, ritrarre il pistone leggermente indietro e chiudere con il tappo azzurro.



Guida introduttiva rapida

4. Rimuovere il puntale e chiudere la siringa con il tappo



Chiudere il tappo e conservare la siringa all'interno della sua scatola/proteggere dalla luce.

5. Posizionare la lampada ARCUS LED



Selezionare CLICK--> modalità "extended" sulle impostazioni della lampada ARCUS PRO. Prima imposta la BlancOne ARCUS sulla modalità "HI" e poi il timer su un massimo di 15 min.

6. Attivazione con luce per 15 min per il massimo effetto



**NON
ATTIVATO**




**ATTIVATO
PARZIALMENTE**



**INTERAMENTE
ATTIVATO**

7. Rimozione del gel sbiancante

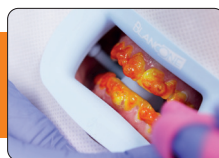

Prima rimuovi il gel sbiancante con l'aspirazione, poi usa l'aspirazione e l'acqua per sciacquare eventuali residui del gel sbiancante.

Risultati sbiancanti



PIC: Suvi Suuhygienisti,
RDH Suvi Hyrkäs




PIC: Leppävaaran Keskuslääkäriasema,
DMD Jesper Johanson

Quando si valuta il risultato finale, prestare attenzione alla situazione dello smalto - noterete che esso appare chiaramente più liscio e sano.

Con la tecnologia brevettata Tooth Rejuvenation, la nano idrossiapatite nanoXIM si lega chimicamente allo smalto, riempiendo le microfratture, e correggendo la trasparenza dello smalto.

CLICK⁺ formula ristrutturante, 60% più efficace rispetto al CLICK

La nuova formulazione **CLICK⁺** utilizza le tecnologie brevettate LIGHTSPEED3.0 e TOOTH REJUVENATION[®](2). La formulazione, arricchita con vitamina D e K, favorisce la crescita di nano idrossiapatite sulla superficie dello smalto, agendo sia come agente remineralizzante che sbiancante, migliorando la luminosità dei denti per un effetto bio-camouflage.

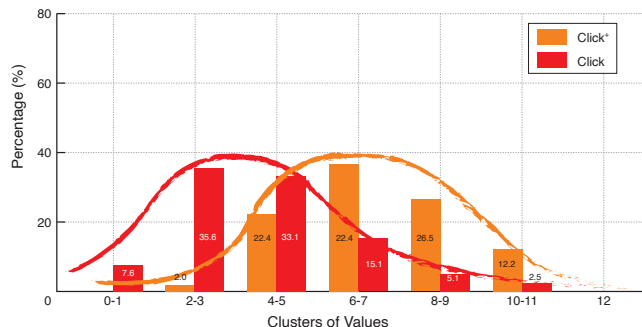

I dati dimostrano chiaramente che **CLICK⁺** rappresenta un importante progresso rispetto alla formulazione precedente.

L'aumento di efficacia non è solo visibile, ma anche statisticamente provato.

La minore variabilità dei risultati, unitamente a valori centrali più elevati, suggerisce una performance più soddisfacente e stabile nel tempo.

Per maggiori info

Scansiona per le istruzioni
ad uso professionale



www.blancone.eu/pro

IDS Spa - Via San Cristoforo, 28/10 - 17100 Savona - Italia

Tel. +39 019 862080 - Fax +39 019 2304865 - email: info@idsdental.it - www.idsdental.it