



HARVARD®

HARVARD IMPLANT

Cemento fissativo semipermanente a polimerizzazione duale per la cementazione di corone e ponti su impianto

- Forza di adesione ottimale, compromesso ideale tra cementazione provvisoria e permanente
- Rimozione del restauro senza danni
- Facilità di rimozione degli eccessi
- Film polimerico elastico per ridurre la pressione masticatoria sugli impianti
- Ottima sigillatura, nessun rischio di ritiro né di ingresso di batteri
- Molto facile e pratico da usare
- Senza eugenolo



Proprietà

✓ Vantaggi!

Forza di adesione ottimale a metà strada tra cementi provvisori e permanenti

- ✓ Adesione di lunga durata e facile rimozione del restauro senza rischio di danni

Nessuna contrazione

Nessun ingresso di batteri

- ✓ Ottima sigillatura
- ✓ Fissaggio sicuro del restauro

Spessore del film ottimale

- ✓ Aderenza eccellente

Film polimerico elastico

- ✓ Riduce la pressione masticatoria sull'impianto

Polimerizzazione duale

- ✓ Fissaggio immediato
- ✓ Facilità di rimozione degli eccessi di materiale

Radiopaco

- ✓ Diagnosi sicura in radiografia

Siringa Harvardmix

- ✓ Affidabile e pratica

A base di metacrilati, con ossido di zinco

- ✓ Estetica gradevole
- ✓ Azione antibatterica

Senza eugenolo

- ✓ Non è inibita la presa di cementi compositi e materiali compositi

HARVARD IMPLANT



Protocollo

Moncone dell'impianto



Riempimento del restauro con Harvard Implant



Fotopolimerizzazione di Harvard Implant



Eccessi di cemento Harvard Implant



Rimozione degli eccessi di Harvard Implant




Impianto con soprastruzione




Caratteristiche fisiche

HARVARD IMPLANT

Resistenza alla compressione*

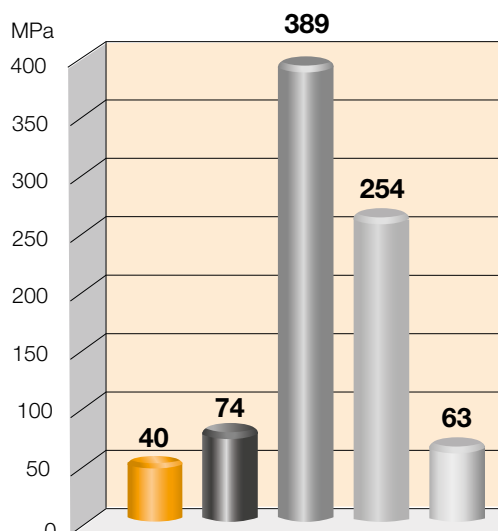

Spessore del film*

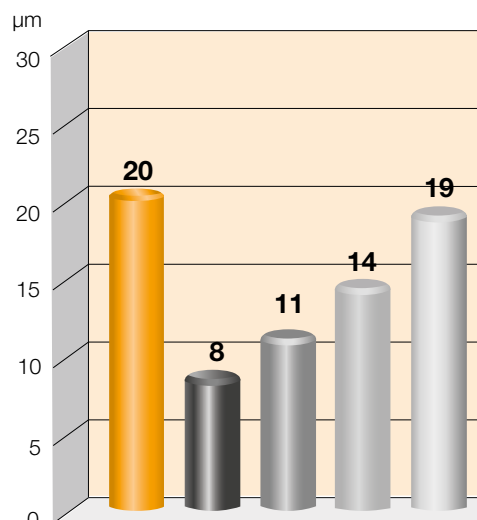

● Harvard Implant

● Systemp Link
(Ivoclar Vivadent)

● Multilink Implant
(Ivoclar Vivadent)


● Implantlink Semi
(Detax)

● Premier Implant
(Premier Dental)

Bassa resistenza
alla compressione
=
maggiore elasticità

Nessun ritiro
+
Spessore ottimale
=
ottima sigillatura
+
fissaggio sicuro

Comportamento volumetrico nell'acqua (37°C)

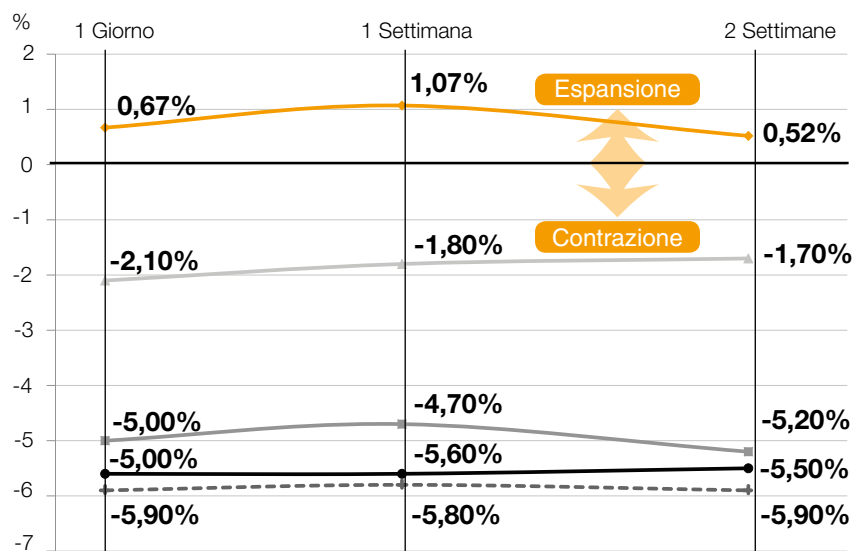

● Harvard Implant

● Premier Implant (Premier Dental)

● Implantlink Semi (Detax)

● Systemp Link (Ivoclar Vivadent)

● Multilink Implant (Ivoclar Vivadent)

Dati Tecnici



HARVARD IMPLANT

Cemento fissativo semipermanente
a polimerizzazione duale
per la cementazione di corone e ponti su impianto

Resistenza alla compressione..... 40 MPa

Spessore del film..... 20 µm

CONFEZIONAMENTI

7081400 Harvard IMPLANT

Siringa automix da 5ml. + 10 puntali



Trade Mark and Quality since 1892

www.harvard-dental.de

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 – 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Tel: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental.de



INTERNATIONAL DENTAL SUPPLY

www.ids dental.it

International Dental Supply srl
Via Valletta San Cristoforo, 28/10
17100 Savona
Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865
info@idsdental.it