

Amuchina S.p.A.

Amuchina MD

Clorossidante elettrolitico per la disinfezione d'alto livello delle impronte dentali

Istruzioni d'uso:

Servirsi dell'apposito tappo dosatore per ottenere le soluzioni d'uso. Amuchina MD è indicata per la disinfezione ad alto livello delle impronte dentali. Testato su qualsiasi materiale di impronta.

Attivo anche su Epatite C.

Modalità d'uso: il prodotto è concentrato e lo si può diluire al 5% o al 10%. Al 5% (50 ml in 1 litro di acqua) il tempo di contatto sarà di 15 minuti, al 10% (100 ml in 1 litro di acqua) il tempo di contatto sarà di 5 minuti.

Per disinfettare impronte in alginato si consiglia la concentrazione al 10% per ridurre il tempo di immersione.

Si consiglia inoltre di sostituire quotidianamente la soluzione.

Smaltibile come rifiuto non pericoloso.

Distribuito in esclusiva nel settore dentale da:

IDS S.p.A.
Via Valletta San Cristoforo, 28/10
17100 Savona
Tel. 019-862080
E-Mail info@idsdental.it