



**Manufacturing Inc. USA**



## Alginate Remover

Detergente per Pulitrici ad Ultrasuoni

*L'Alginate Remover è un detergente per una eccellente pulizia in ultrasuoni dall'alginate da portaimpronta in alluminio, cromo, ferro e plastica e dallo strumentario.*

### Istruzioni d'uso:

- L'azienda garantisce affidabilità e protezione del prodotto. Per aprire il barattolo, collocatelo su di una superficie piana. Rimuovere il tappo e tagliate il sigillo interno lentamente. Non agitate il contenitore.
- Sciogliete quattro cucchiai di polvere (2 oz.) in un litro di acqua calda.
- Eliminate l'eccesso di alginato dai portaimpronta
- Posizionate la vasca ausiliaria o il bicchiere in una vasca ad ultrasuoni. Se viene usato il bicchiere, collocatelo nel coperchio di posizione ad una altezza che rimanga sollevato dal fondo di circa 2,5 cm.
- Tempo di pulitura approssimativo: 5-10 minuti a seconda del volume e della quantità di materiale da rimuovere. In alcuni casi può essere necessaria una leggera spazzolata.
- Dopo la pulizia risciacquare in acqua corrente.
- Note: il nichel e il cloro possono essere puliti insieme. Pulite separatamente i portaimpronta in alluminio**
- Non lasciate i portaimpronta nella soluzione più del necessario
- Cambiate la soluzione dopo ogni uso per evitare contaminazioni crociate.

### ATTENZIONE. SOLO PER USO PROFESSIONALE – NON PER USO INTERNO

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Tenere il contenitore chiuso
- Non aggiungere alcun ingrediente a questa soluzione
- Da utilizzare con ventilazione adeguata
- Non mischiare con altre soluzioni
- QUESTO E' UN CONCENTRATO, diluire bene con attenzione



Via Valletta San Cristoforo, 28/10 – 17100 Savona – ITALY  
+39.019.862080 fax +30.019.2304865 – info@idsdental.it

[www.idsdental.it](http://www.idsdental.it)

