



Manufacturing Inc. USA



General Purpose Cleaner Concentrate Non-Ammoniated

Soluzione Detergente per Pulitrici ad Ultrasuoni

Soluzione detergente per una eccellente pulizia in ultrasuoni dello strumentario, frese e quant'altro. Questa soluzione permette la perfetta rimozione di sangue, tessuti, siero e detriti, può essere utilizzato inoltre per la rimozione di paste per la lucidatura, ruggine, ossidazioni e per la pulizia di metalli, oro e ceramica. Biodegradabile, non contiene fosfati.

Istruzioni d'uso:

- Il flacone è dotato di una pellicola sigillante sotto al tappo. Per aprire il flacone tagliare la pellicola con cautela. Non schiacciare il flacone.
- LA SOLUZIONE E' CONCENTRATA. Diluire 1 parte di soluzione e 10 d'acqua. Versare la diluizione direttamente nella vasca ad ultrasuoni.
- Per la pulizia dello strumentario, posizionarlo nel cestello ed inserire lo stesso nella vasca dell'apparecchio ad ultrasuoni. La soluzione deve ricoprire completamente lo strumentario.
- Azionare l'ultrasuoni per circa 3-5 minuti a seconda della quantità di strumentario inserito e dalla variabilità dei detriti depositati.
- A pulizia ultimata sciacquare con acqua corrente.
- Soluzione studiata anche per una perfetta diffusione delle onde ultrasoniche all'interno del liquido nell'utilizzo di bicchieri con prodotti specifici (ad es. per la rimozione di cementi od altro)
- Per ottenere ottimi risultati nella detersione si consiglia di sostituire la soluzione giornalmente anche per evitare il pericolo di infezioni crociate.
- NON USARE CON ALLUMINIO

ATTENZIONE. SOLO PER USO PROFESSIONALE – NON PER USO INTERNO

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Tenere il contenitore chiuso
- Non aggiungere alcun ingrediente a questa soluzione
- Da utilizzare con ventilazione adeguata
- Non mischiare con altre soluzioni
- QUESTO E' UN CONCENTRATO, diluire bene con attenzione



Via Valletta San Cristoforo, 28/10 – 17100 Savona – ITALY
+39.019.862080 fax +30.019.2304865 – info@idsdental.it



