



**Manufacturing Inc. USA**



## Advanced Formula Temporary Cement Remover

Detergente per Pulitrici ad Ultrasuoni

*Soluzione detergente per l'eliminazione dei cementi a base di zinco-ossido con e senza eugenolo e da cementi provvisori a base fosfato di zinco da ponti e corone.*

### Istruzioni d'uso:

- Il flacone è dotato di una pellicola sigillante sotto al tappo. Per aprire il flacone tagliare la pellicola con cautela. Non schiacciare il flacone.
- LA SOLUZIONE E' PRONTA ALL'USO. UTILIZZARE SOLAMENTE NEL BICCHIERE
- Posizionate il bicchiere in una vasca ad ultrasuoni collocandolo nel coperchio di posizione ad una altezza che rimanga sollevato dal fondo di circa 2,5 cm.
- Tempo di pulitura approssimativo: 5-10 minuti a seconda del volume e della quantità di materiale da rimuovere.
- A pulizia ultimata sciacquare con acqua corrente.
- Per ottenere ottimi risultati nella detersione si consiglia di sostituire la soluzione giornalmente anche per evitare il pericolo di infezioni crociate.
- NON USARE CON ALLUMINIO

### ATTENZIONE. SOLO PER USO PROFESSIONALE – NON PER USO INTERNO

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Tenere il contenitore chiuso
- Non aggiungere alcun ingrediente a questa soluzione
- Da utilizzare con ventilazione adeguata
- Non mischiare con altre soluzioni
- QUESTO E' UN CONCENTRATO, diluire bene con attenzione



Via Valletta San Cristoforo, 28/10 – 17100 Savona – ITALY  
+39.019.862080 fax +30.019.2304865 – info@idsdental.it

[www.idsdental.it](http://www.idsdental.it)

