



Manufacturing Inc. USA



Tartar, Light Stain & Permanent Cement Remover

Detergente per Pulitrici ad Ultrasuoni

Soluzione detergente per l'eliminazione di tartaro, leggere macchie, cementi definitivi, alcuni cementi provvisori, calcare ed idrossidi di calcio.

Biodegradabile, non contiene fosfati.

Istruzioni d'uso:

- Il flacone è dotato di una pellicola sigillante sotto al tappo. Per aprire il flacone tagliare la pellicola con cautela. Non schiacciare il flacone.
- LA SOLUZIONE E' PRONTA ALL'USO. UTILIZZARE SOLAMENTE NEL BICCHIERE
- Posizionare il bicchiere in una vasca ad ultrasuoni collocandolo nel coperchio di posizione ad una altezza che rimanga sollevato dal fondo di circa 2,5 cm.
- Tempo di pulitura approssimativo: 2 minuti (se rimane lo strumentario più di 5 minuti si può ossidare)**
- A pulizia ultimata sciacquare con acqua corrente. In caso di detersione di protesi spazzolarla leggermente e sciacquare abbondantemente.
- Detergere nella vasca ad ultrasuoni utilizzando il detergente General Non Ammoniated e successivamente sciacquare con acqua.
- Per ottenere ottimi risultati nella detersione si consiglia di sostituire la soluzione giornalmente anche per evitare il pericolo di infezioni crociate.
- NON USARE CON ALLUMINIO

ATTENZIONE. SOLO PER USO PROFESSIONALE – NON PER USO INTERNO

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Tenere il contenitore chiuso
- Non aggiungere alcun ingrediente a questa soluzione
- Da utilizzare con ventilazione adeguata
- Non mischiare con altre soluzioni
- QUESTO E' UN CONCENTRATO, diluire bene con attenzione



Via Valletta San Cristoforo, 28/10 – 17100 Savona – ITALY
+39.019.862080 fax +30.019.2304865 – info@idsdental.it

www.idsdental.it

