



Manufacturing Inc. USA



UltraDose Tartar Light Stain Remover Powder

Detergente per Pulitrici ad Ultrasuoni

Soluzione detergente per l'eliminazione di tartaro, leggere macchie, alcuni cementi provvisori, calcare ed idrossidi di calcio. Biodegradabile, non contiene fosfati.

Istruzioni d'uso:

- Posizionare il bicchiere in una vasca ad ultrasuoni collocandolo nel coperchio di posizione ad una altezza che rimanga sollevato dal fondo di circa 2,5 cm.
- Versare il contenuto della busta ed aggiungere 400 ml d'acqua calda
- Tempo di pulitura approssimativo: 3-5 minuti (se rimane lo strumentario più di 10 minuti si può ossidare)**
- A pulizia ultimata sciacquare con acqua corrente. In caso di detersione di protesi spazzolarla leggermente e sciacquare abbondantemente.
- Detergere nella vasca ad ultrasuoni utilizzando il detergente General Non Ammoniated e successivamente sciacquare con acqua.
- Per ottenere ottimi risultati nella detersione si consiglia di sostituire la soluzione giornalmente anche per evitare il pericolo di infezioni crociate.
- NON USARE CON ALLUMINIO**

ATTENZIONE. SOLO PER USO PROFESSIONALE – NON PER USO INTERNO

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Tenere il contenitore chiuso
- Non aggiungere alcun ingrediente a questa soluzione
- Da utilizzare con ventilazione adeguata
- Non mischiare con altre soluzioni
- QUESTO E' UN CONCENTRATO, diluire bene con attenzione**



INTERNATIONAL DENTAL SUPPLY

Via Valletta San Cristoforo, 28/10 – 17100 Savona – ITALY
+39.019.862080 fax +39.019.2304865 – info@idsdental.it

www.idsdental.it

