

Figura 3




3420 FOSTORIA WAY STE. A-200
SAN RAMON, CALIFORNIA 94583 USA
WWW.DANVILLEMATERIALS.COM
PHONE 800/827-7940 FAX 925/973-0764



EU REP:
HELMUTH MÄYER LIC. OEC. HSG
49, BURENWEG, CH - 8053 - ZÜRICH
SWITZERLAND
PHONE: 011-41-44-422-7766 FAX: 011-41-44-422-9988

94060 Rev B

MacroCab+™

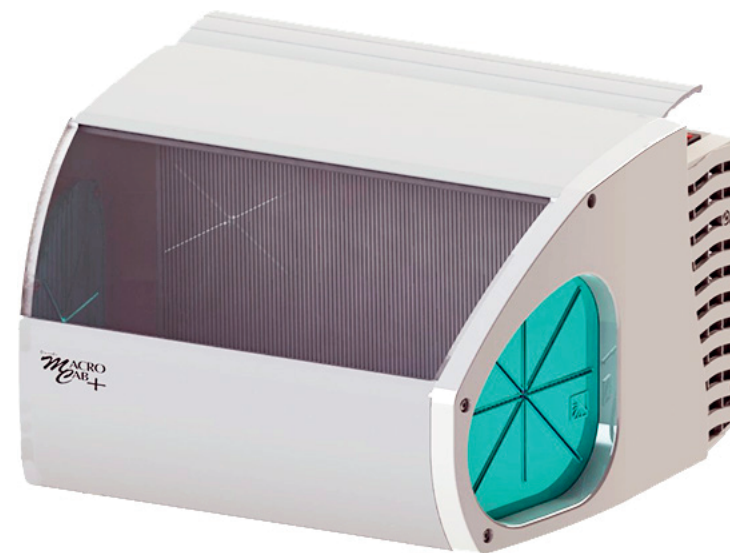

ISTRUZIONI

Il box MacroCab+ è ideale per contenere le polveri di sabbatura e i residui di molaggio. Dispone di un duplice sistema interno di aspirazione e filtraggio e di brillanti luci a LED per un'illuminazione uniforme.

Compatto e portatile, il box MacroCab+ è perfetto per qualsiasi laboratorio o sala operatoria.

UTILIZZO

Il box MacroCab+ è spedito con il cavo di alimentazione inserito all'interno dello stesso. Prima dell'uso, collegare il cavo di alimentazione all'ingresso posto sul retro (si veda la Figura 3) e a una presa elettrica.

L'interruttore ON/OFF ubicato sotto l'impugnatura integrata azionerà le luci a LED e il sistema di aspirazione/filtraggio.

Il box MacroCab+ è progettato per fornire totale accesso alle mani o solo alle punte delle dita con il MicroEtcher (o il manipolo) e il pezzo da lavorare posizionati nel box stesso.

Dirigere il getto di materiale abrasivo verso la parte posteriore del box contribuisce a contenere il materiale stesso, il quale, invece, tenderebbe a fuoriuscire se il getto è diretto verso l'apertura per le mani.

INSTALLAZIONE DELLO SCHERMO TRASPARENTE

Quattro schermi trasparenti monouso sono forniti in dotazione al kit originale. Ciascuno schermo trasparente è ricoperto da una pellicola di protezione di colore blu, che deve essere rimossa prima dell'uso.

Lo schermo trasparente si installa facendone scorrere il lato lungo in alto sotto la parte superiore del telaio in metallo (si veda la Figura 1).

Curvando leggermente lo schermo, si inserisce il lato inferiore dello stesso nel bordo anteriore sulla parte inferiore dell'apertura per lo schermo.

Lo schermo trasparente deve essere rimosso solo per la sostituzione.

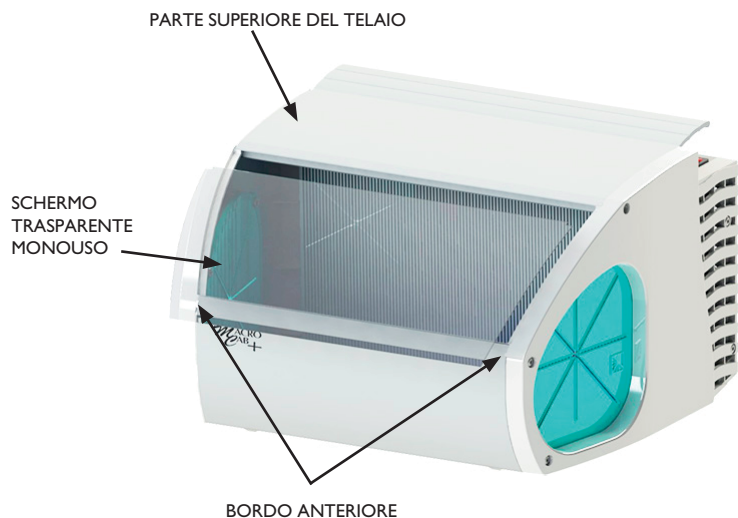


Figura 1

PULIZIA

Il box MacroCab+ si apre facilmente per la pulizia, che deve essere effettuata regolarmente secondo la frequenza d'uso. (Si vedano le Figure 2 & 3.)

1. Scollegare il cavo di alimentazione dall'ingresso posto sul retro del box.
2. Aprire i due fermi sul retro del box.
3. Rimuovere lo schermo trasparente.
4. Afferrando l'impugnatura sul lato superiore, tirare il filtro e la parte superiore del box verso l'alto, estraendoli dal corpo del box.
5. Scaricare tutti i residui dal box. Il filtro può essere rimosso e battuto leggermente contro le pareti di un secchio della spazzatura. Ciò consente alla polvere intrappolata nelle alette del filtro di fuoriuscire. Se si rimuove il filtro dal gruppo filtro, reinstallarlo con le alette in senso verticale.
6. Reinstallare il gruppo filtro facendolo scorrere verso il basso dentro il box. Assicurarsi che la gomma arancione del filtro scorra dietro le alette di chiusura che sporgono all'interno del box dai pannelli laterali dello stesso. È inoltre presente una scanalatura sotto la parte anteriore del coperchio del box, che accoglie la piccola bacchetta che corre nel telaio del box. Ciò garantisce un adeguato allineamento.
7. Richiudere i fermi sul retro del box e riposizionare lo schermo trasparente e il cavo di alimentazione.

DISINFEZIONE

Una volta rimosso il gruppo filtro, è possibile pulire l'interno del box spruzzando del disinfettante e passando un panno, dopo aver eliminato il materiale abrasivo/i residui.

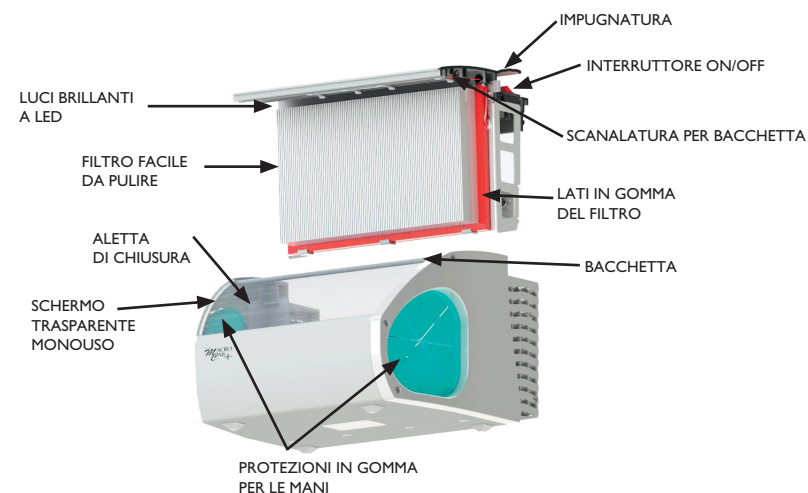


Figura 2