

INDICAZIONI

SPORIGERM PERACETIC PLUS

è una polvere disinfettante/sterilizzante per strumenti chirurgici invasivi.

Il principio attivo acido peracetico si sviluppa "in situ" dopo aver disciolto la polvere in acqua ed aver così ottenuto una soluzione acquosa di acido peracetico.

SPORIGERM PERACETIC PLUS può essere utilizzato anche con lavaendoscopi ed è efficace per una sterilizzazione e disinfezione rapida di: endoscopi, fibre ottiche, strumenti chirurgici e odontoiatrici, trasduttori.

ISTRUZIONI PER L'USO

Diluire SPORIGERM PERACETIC PLUS utilizzando acqua potabile tiepida a circa 35 °C; la soluzione così ottenuta sarà limpida, di colore blu chiaro e pronta all'utilizzo dopo 15 minuti.

La soluzione, una volta divenuta completamente incolore, potrà essere utilizzata per l'immersione di strumenti precedentemente lavati con le seguenti modalità:

Per decontaminare/disinfettare:

utilizzare 8 g di polvere (pari ad 1 misurino) ogni litro d'acqua per 10 minuti. Dopo il tempo di contatto rimuovere e risciacquare accuratamente.

Per sterilizzare:

utilizzare 16 g di polvere (pari a 2 misurini) ogni litro d'acqua per 10 minuti. Successivamente rimuovere gli strumenti e risciacquare in acqua sterile. Per la conservazione asettica usare un prodotto appropriato. La soluzione resta attiva per un tempo massimo di 24 ore dalla preparazione. Dopo l'utilizzo, il prodotto diluito può essere smaltito come rifiuto non pericoloso.

CONFEZIONAMENTO

Sporigerm Peracetic Plus


Codice 502002 2 Barattoli da 500 g
Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tali materiali non contengono lattice e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato.

COMPOSIZIONE

100,00 g di prodotto
Tetracetilendiammina 25,00 g;
Sodio Percarbonato 42,00 g;
Coformulanti q.b. a 100,00 g.

Disinfettante sterilizzante a freddo
**attivo in 10 minuti su spore,
HIV, HCV, HBV, TBC, funghi e batteri**

Dispositivo Medico Classe IIb
CE n° 0546

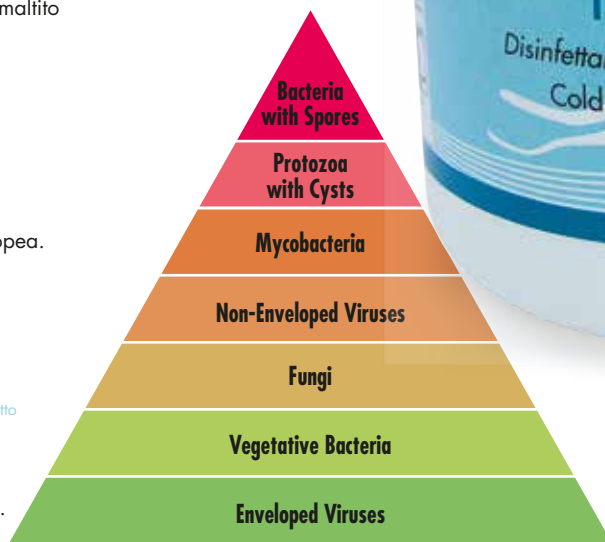

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI

Prodotto da:
GERMO S.p.A.
Via Giotto n 19/21 - 20032 Cormano M
Tel. 02 663 01 938
www.germo.it - info@germodis.com



Distribuito da:
IDS S.p.A.
Via S. Cristoforo 28/10
17100 Savona - Italy
www.ids dental.it - info.ids dental.it

Disinfettante sterilizzante a freddo
**attivo in 10 minuti su spore,
HIV, HCV, HBV, TBC, funghi e batteri**

CARATTERISTICHE

Polvere granulare di colore bianco che può avere riflessi azzurri.

ATTIVITÀ

I test di efficacia antimicrobica eseguiti sono riassunti in tabella:

EN13727; EN14561

Battericida0,4%..... 10 min

EN13624; EN14562

Lieviticida (C. albicans).....0,4%..... 10 min

EN14563

Micobattericida/Tubercolicida0,4%..... 10 min

EN13704

Sporicida0,8%..... 10 min

EN13624; EN14562

Fungicida (A. brasiliensis)1,6%..... 10 min

EN14476

Virucida.....1,6%..... 10 min

EN14937


Sterilizzante a freddo1,6%..... 10 min

VALIDITÀ PRODOTTO

Il prodotto ha una validità di 2 anni dalla data di produzione, va conservato nella confezione originale.

Il prodotto teme l'umidità.

AGENTI PATOGENI CLASSIFICATI IN BASE ALLA RESISTENZA AI DISINFETTANTI

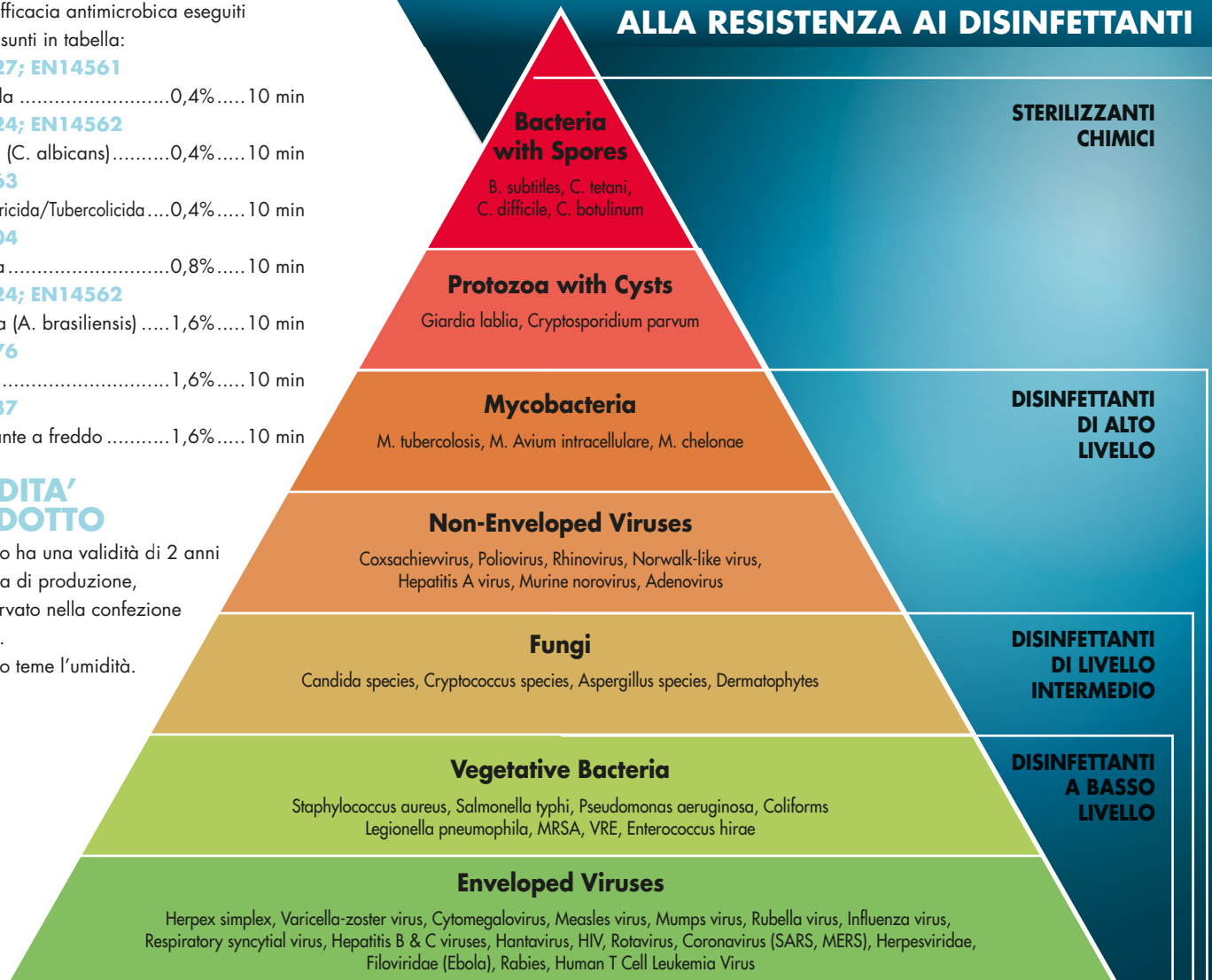

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITÀ'

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

AUTORIZZAZIONI

Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva 2007/47/CEE.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI

Prodotto da:

GERMO S.p.A.

Via Giotto n 19/21 - 20032 Cormano M

Tel. 02 663 01-938

www.germo.it - info@germodis.com

Distribuito da:

IDS S.p.A.

Via S. Cristoforo 28/10

17100 Savona - Italy

www.ids dental.it - info.ids dental.it