

Nebulizzatore disinfettante per ambienti
**elimina rapidamente
funghi, batteri e allergeni**

Rev. 7 - 07/2018

INDICAZIONI

SPRAY DISINFETTANTE VIROXID AIR

è stato formulato per neutralizzare batteri e cattivi odori.

Elimina rapidamente funghi, batteri ed allergeni.

SPRAY DISINFETTANTE VIROXID AIR

non bagna, non macchia, non lascia residui e non danneggia tessuti e materiali; è quindi utile per disinfettare e deodorare superfici dure e morbide di ambienti chiusi, oggetti, indumenti, tessuti, apparecchiature elettroniche e climatizzatori.

La bombola a svuotamento completo si utilizza in ambienti ad alta frequentazione e a maggiore rischio infettivo come ambulatori, sale d'attesa e di degenza e in tutti quei luoghi in cui il passaggio di persone può compromettere la qualità dell'igiene. SPRAY DISINFETTANTE VIROXID AIR garantisce le condizioni di sicurezza igienico sanitario e elimina i nemici indesiderati della salute.

APPLICAZIONI

SPRAY DISINFETTANTE VIROXID AIR è indicato per disinfettare e deodorare oggetti e superfici degli studi medici.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per disinfettare gli ambienti: Pulire a fondo le superfici da disinfettare utilizzando un opportuno detergente. Non fumare durante l'applicazione. Chiudere le finestre e le porte dell'ambiente in cui si effettua l'operazione. Posizionare una bombola al centro dell'ambiente da disinfettare. Premere a fondo la valvola fino al bloccaggio completo, per consentire lo svuotamento totale. Uscire dalla stanza e chiudere la porta. Attendere lo svuotamento della bombola e lasciare agire per 15 minuti. Aprire le finestre e le porte ed aerare.

CONFEZIONAMENTO

Viroxid Air

Codice 070600/1 Flacone da 150 ml

Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Il materiale utilizzato non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.

COMPOSIZIONE 100,00 g di prodotto

Benzalconio Cloruro 0,10 g;
O-fenilfenolo 0,02 g;
Alcool isopropilico, profumo, propellenti q.b. a 100,00 g.



INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI

Prodotto da:
GERMO S.p.A.
Via Giotto n 19/21 - 20032 Cormano M
Tel. 02 663 01 938
www.germo.it - info@germodis.com



Distribuito da:
IDS S.p.A.
Via S. Cristoforo 28/10
17100 Savona - Italy
www.ids dental.it - info@idsdental.it

Nebulizzatore disinfettante per ambienti
**elimina rapidamente
funghi, batteri e allergeni**

ATTIVITA'

Il Benzalconio cloruro associato all' O-fenilfenolo e all'Alcol isopropilico garantisce un completo spettro d'azione nei confronti di batteri Gram-positivi, Gram-negativi e funghi.

TEST

Attività battericida:

**EN 1040; EN1276; EN 13697;
EN 13727; NF T 72-281**


Attività fungicida:

EN 1275; EN 1650; EN 13697

VALIDITA' PRODOTTO

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

AGENTI PATOGENI CLASSIFICATI IN BASE ALLA RESISTENZA AI DISINFETTANTI

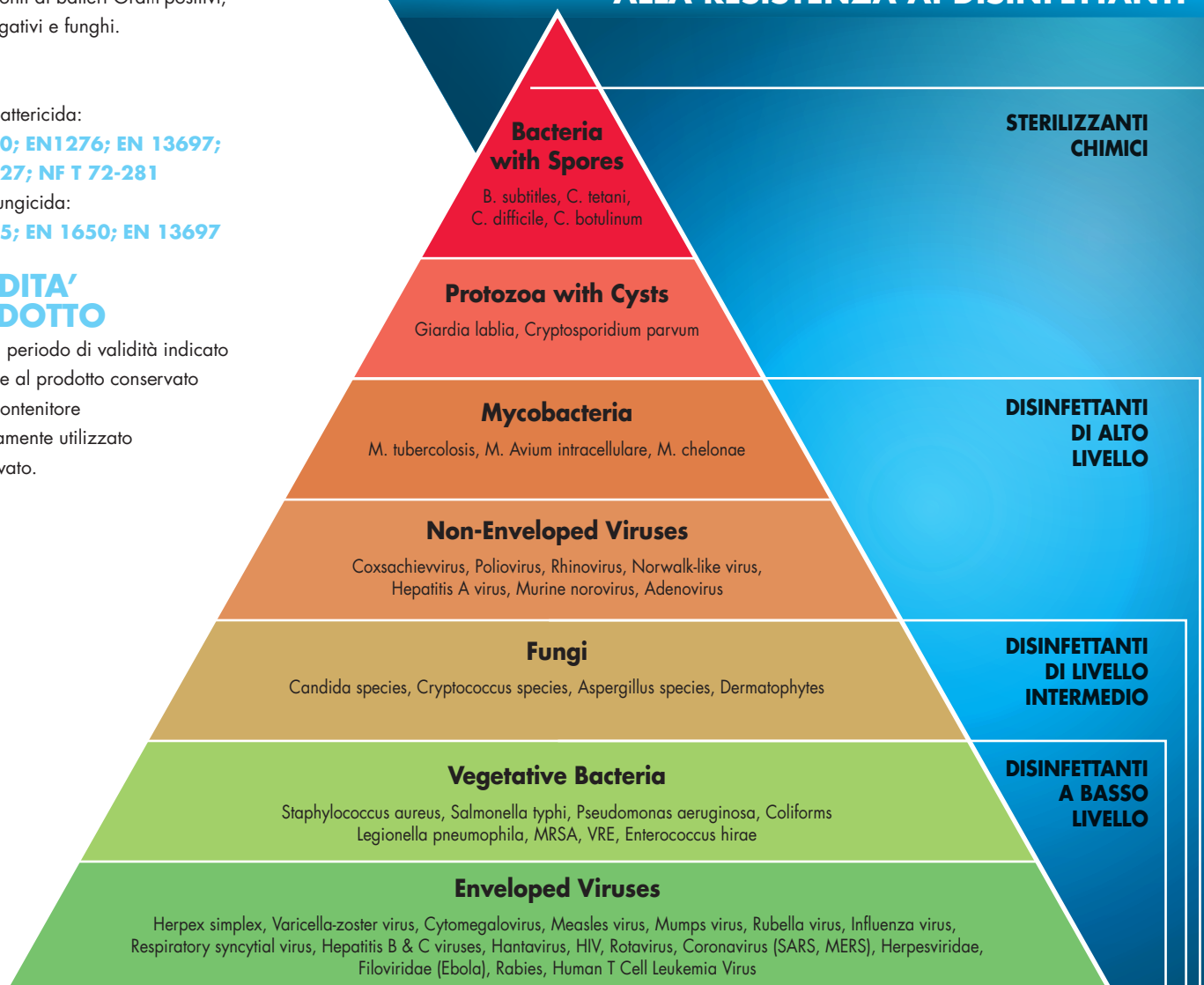

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITA'

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

AUTORIZZAZIONI

Presidio Medico Chirurgico –
Registrazione Ministero della Salute
N. 7604.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI

Prodotto da:

GERMO S.p.A.

Via Giotto n 19/21 - 20032 Cormano M

Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

Distribuito da:

IDS S.p.A.

Via S. Cristoforo 28/10

17100 Savona - Italy

www.ids dental.it - info@idsdental.it