

## INDICAZIONI

SPORIGERM FAZZOLETTI<sup>+</sup> è un dispositivo medico pronto all'uso che svolge un'efficace azione disinfettante contro batteri Gram-positivi e Gram-negativi, lieviti, Micobatterio Tuberculare (TBC), Virus (compresi HIV – HBV – HCV).

Il pratico formato in salviette fa di SPORIGERM FAZZOLETTI<sup>+</sup> un prodotto specifico per la disinfezione e contemporanea detersione di superfici di dispositivi medici non invasivi, come riuniti, piani di lavoro, bracciali, maniglie, turbine, maschere facciali, poggiatesta, etc., anche in presenza di materiale organico (sangue, saliva, essudati).

## ISTRUZIONI PER L'USO

Passare sulle superfici e sugli oggetti da pulire, da decontaminare e da disinfettare assicurandosi che siano completamente inumiditi. Non è necessario risciacquare.

## TEMPI DI CONTATTO

Virus con involucro (HIV-HBV-HCV) .....	5 min
Batteri .....	5 min
Funghi (lieviti) .....	5 min
Virus senza involucro (Adenovirus) .....	5 min
Micobatterio Tuberculare (TBC).....	60 min

## CONFEZIONAMENTO

### Sporigerm Fazzoletti<sup>+</sup>

Codice 501002 ..... 12 Flow Pack da 50 fazzoletti


Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tali materiali non contengono lattice e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato.

## COMPOSIZIONE 100,00 g di prodotto

Benzalconio Cloruro .....	0,50 g;
O-fenilfenolo .....	0,02 g;
Alcool isopropilico; Alcol etilico; coformulanti;	
acqua depurata q.b. a .....	100,00 g.

Disinfettante detergente  
**ad azione tubercolicida,  
battericida, fungicida, virucida**

Dispositivo Medico Classe IIb  
CE n° 0546

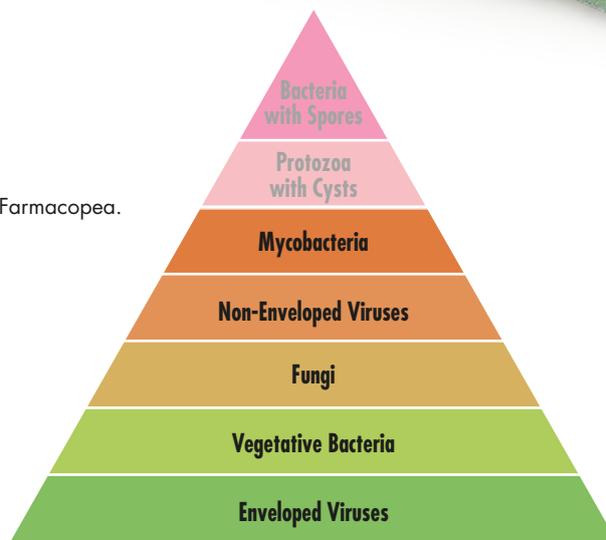

## INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI

Prodotto da:  
GERMO S.p.A.  
Via Giotto n 19/21 - 20032 Cormano M  
Tel. 02 663 01 938  
www.germo.it - info@germodis.com



Distribuito da:  
**IDS S.p.A.**  
Via S. Cristoforo 28/10  
17100 Savona - Italy  
www.ids dental.it - info.ids dental.it

Disinfettante detergente  
ad azione tubercolicida,  
battericida, fungicida, virucida

## CARATTERISTICHE

Fazzolettini imbevuti.

## ATTIVITÀ

Il Sale d'Ammonio Quaternario in sinergia con O-Fenilfenolo, in soluzione alcolica, garantisce un totale spettro d'azione nei confronti di batteri Gram-positivi e Gram-negativi, lieviti, micobatteri (TBC) e virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV).

### EN13727 - EN 13697

Battericida ..... 5 minuti

### EN13624 - EN 13697

Lieviticida ..... 5 minuti

### EN14476

Virucida (Adenovirus, HIV-HCV-HBV) ..... 5 minuti

### EN14348

Micobatterio Tuberculare (TBC) ..... 60 minuti


## VALIDITA' PRODOTTO

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

## MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

## AGENTI PATOGENI CLASSIFICATI IN BASE ALLA RESISTENZA AI DISINFETTANTI

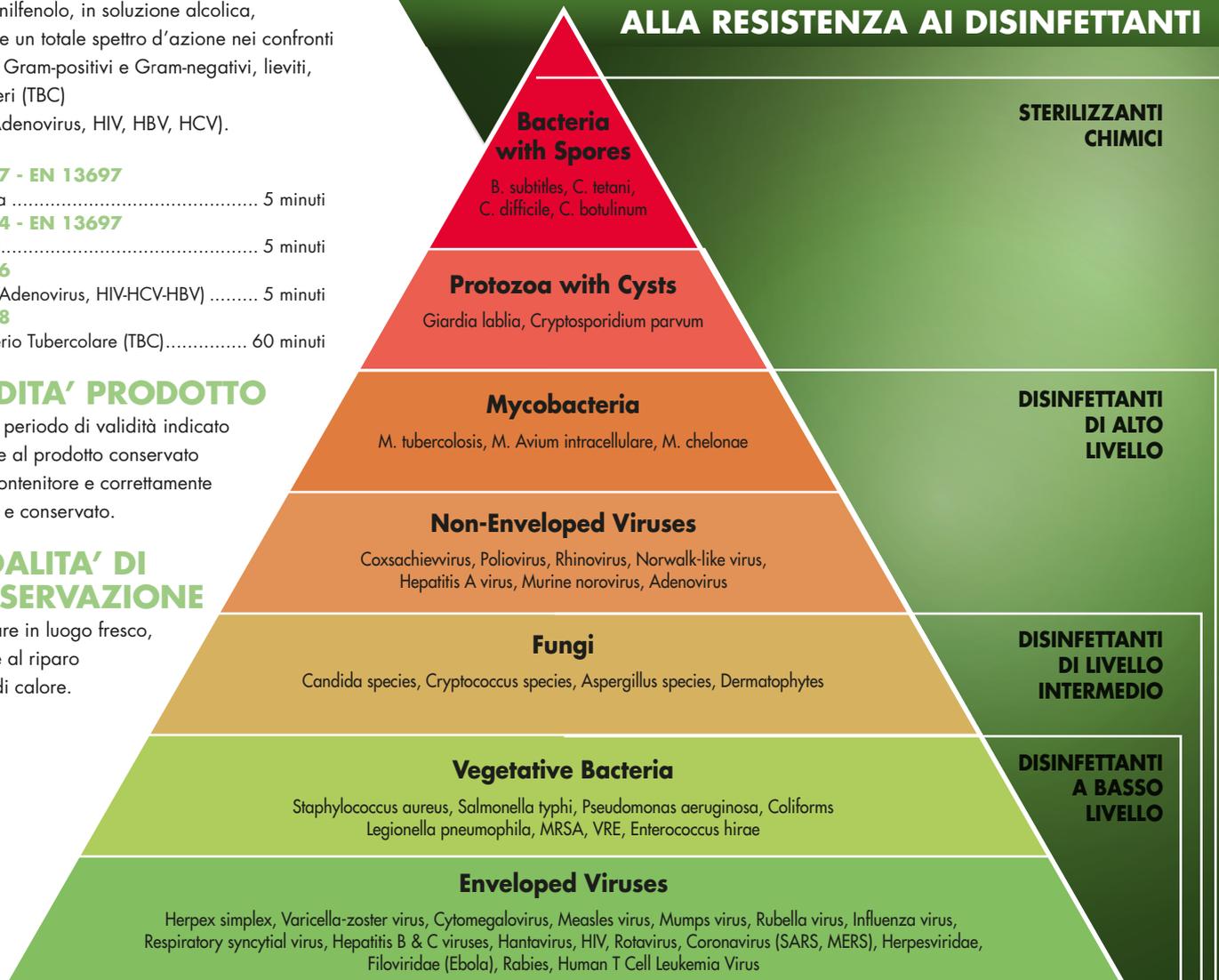

## AVVERTENZE

Evitare l'impiego su materiali deteriorabili dall'alcol.

## CONTROLLI QUALITA'

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

## AUTORIZZAZIONI

Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva 2007/47/CEE.

## INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI

Prodotto da:

GERMO S.p.A.

Via Giotto n 19/21 - 20032 Cormano M

Tel. 02 663 01-938

www.germo.it - info@germodis.com

Distribuito da:

IDS S.p.A.

Via S. Cristoforo 28/10

17100 Savona - Italy

www.ids dental.it - info.ids dental.it