



**Die  
erschwingliche  
Zahnaufhellung  
für alle**

**BLANCONE<sup>®</sup>**

**Professionelle kosmetische  
Zahnaufhellung**



# BlancOne®: Ein neues Musterbeispiel der Zahnaufhellung


Die BlancOne® Behandlungen sind das Ergebnis **fünfzehnjähriger Forschungsarbeiten**, die zu einem **neuen Ansatz** bei der Zahnaufhellung geführt haben und auf der Entwicklung **neuer photochemischer Technologien** basieren.

Es wurde weithin gezeigt, dass Licht von Bleichlampen emittiert wird verbessert nicht die Wirksamkeit des Peroxids, das in der Zahnaufhellung verwendet wird, aber nur leicht beschleunigt dank der Hitze, die auf dem Gel freigesetzt wird.

Die **photochemisch aktiven Gels von BlancOne®** beinhalten hingegen neben dem Peroxid **zwei spezielle Bestandteile**, die mit Hilfe der Aufhellungslampe in der Lage sind, das Peroxid **mit einer Geschwindigkeit und einer Effizienz zu spalten**, **die mit den chemischen Reaktionen herkömmlicher Aufhellungssysteme nicht möglich sind**.

- **PHOTOSENSIBILISATOREN**, spezielle Farbstoffe, die die von einer Lampe mit spezifischer Wellenlänge ausgestrahlten **Photonen nutzen** und einen **elektronisch erregten Zustand erreichen**, der dem gesamten System hohe Energie verleiht.
- **KATALYSATOREN**, die diese hohe Energie synthetisieren und **eine Kettenreaktion auslösen**, die das Spalten der Peroxide unglaublich beschleunigt.

Dieser **“explosive” Energiemechanismus** ist dazu in der Lage, in kurzer Zeit **eine ganz spezielle Sauerstoffform** zu entwickeln: **SINGULETT-SAUERSTOFF**, eine atomare Sauerstoffform, die kein Radikal darstellt und **eine sehr viel schnellere, tiefere und sicherere Oxidationswirkung** ausübt als freie Radikale (ROS), die von herkömmlichen Aufhellungssystemen entwickelt werden.

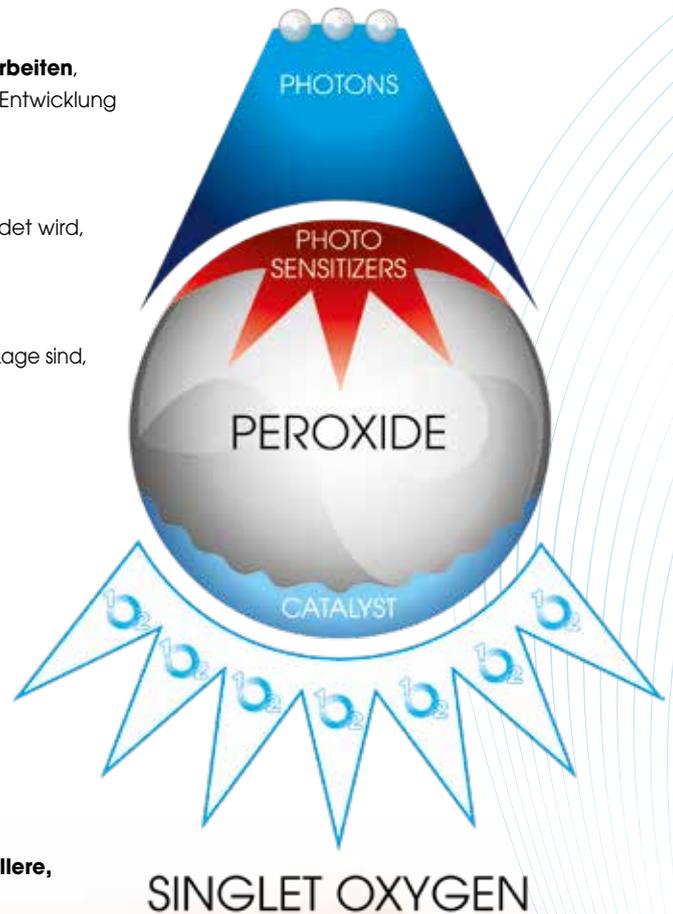

# BlancOne® CLICK: die Zahnaufhellung, die Ihr Verfahren für immer revolutioniert

Die innovative BlancOne® Technologie hat zur Entwicklung von BlancOne® CLICK geführt, einer revolutionären und einzigartig schnellen Aufhellungsbehandlung, die sich mit der Dentalhygiene-Sitzung kombinieren lässt.



## Effizient auch bei niedrigen Konzentrationen

Wir haben es zum ersten Mal geschafft, eine in der Praxis vorzunehmende Aufhellungsbehandlung zu entwickeln, die mit niedriger Peroxidkonzentration (<6%) arbeitet und **auf Linie mit der Europäischen Richtlinie 84/2011** ist, der modernsten Verbraucherschutzrichtlinie.



## Ohne Zahnfleischschutz

Wir haben **die einzigen in der Praxis zu verwendenden Aufheller geschaffen, die keinen Schutz der Schleimhaut erfordern**, und die heikelste Passage der Prozedur überflüssig gemacht, sodass jetzt **jeder das Verfahren einfach und sicher ausführen kann**.



## Agiert in nur 10 Minuten

Dank der photochemischen Technologie von BlancOne® wird die Spaltung von 16%igem Carbamidperoxid, die normalerweise Stunden erfordert, auf wenige Minuten verkürzt.

**Die Behandlung fällt sehr viel schneller und angenehmer aus und kann mit der Dentalhygiene-Sitzung kombiniert werden.**



## Ohne Schmerzen und Empfindlichkeiten

Mit ihren superschnellen Reaktionszeiten greifen alle in der Praxis stattfindenden BlancOne® Aufhellungsbehandlungen **weder den Zahnschmelz an, noch entziehen sie ihm Wasser, ferner werden weder Schmerzen noch Empfindlichkeiten induziert**; in der Tat sind es die einzigen auf dem Markt befindlichen Produkte ohne empfindlichkeitshemmende und remineralisierende Agenzien.



## Erschwinglich und wiederholbar

Mit ihren schnellen Sitzungen und preislich vertretbaren Kosten kann BlancOne® CLICK zu einem **Preis angeboten werden, der für alle erschwinglich ist**.

Ideal, um den Patienten an die Zahnaufhellung heranzuführen, **kann häufig wiederholt werden** und das Interesse für intensivere Behandlungen wecken.



# Alles beginnt mit einem **CLICK**

Mit einer **typischen Verbesserung um 4-5 Weißheitsstufen\***, kommen geringe Kosten auf den Patienten zu und auch noch sehr komfortabel ist. Die Sitzung dauert nur wenige Minuten und somit ist BlancOne® CLICK eine **Aufhellungsbehandlung, die mit einem ganz neuen Konzept arbeitet und den IDEALEN Ausgangspunkt** für alle darstellt, um ein sofort weißeres und strahlenderes Lächeln auszuprobieren

- ✓ **IDEAL als Behandlung, um an die Zahnaufhellung heranzuführen**
- ✓ **IDEAL für alle, die über kein üppiges Budget verfügen**
- ✓ **IDEAL als Ergänzung für jede Dentalhygiene-Sitzung**
- ✓ **IDEAL als Marketing- und Werbeaktion für die Praxis**

Mit über 100.000 allein in Italien stattgefundenen Aufhellungsbehandlungen und einem Patientenzufriedenheitsindex von 4,5 von 5, hat sich BlancOne® CLICK bereits als die **1. Wahl bei Zahnärzten und Patienten etabliert!**

\* Mit der Vita Classic Skala gemessene Weißheitsstufen, die für die Zahnaufhellung neu gestaltet wurde. Die Daten wurden mit 10.956 Fällen gesammelt, die mithilfe der BlancOne PRO App registriert wurden.



Sie schenken jetzt zum ersten Mal **die Genugtuung eines neuen Lächelns,** weißer und strahlender als vorher **und das nach jeder Dentalhygiene-Sitzung.**

Dentalhygiene-Sitzungen sind Alltag in der Zahnarztpraxis und Ihre Patienten erwarten, dass die Zähne nach der Dentalhygiene-Sitzung weißer aussehen und aus diesem Grund ist dies genau der richtige Moment, um den Erwartungen gerecht zu werden.

# Wie Sie das Maximum für das Lächeln Ihrer Patienten erreichen

Nachdem Sie Ihre Patienten mit BlancOne® CLICK in Erstaunen versetzt haben, können Sie ihnen erklären, wie sie ein noch eklatanteres und lang anhaltendes Resultat erzielen können. Je nach Vorliebe, Mitwirkung und Budget des Patienten können Sie 4 verschiedene Strategien vorschlagen:

CLICK

## Wiederholung

der CLICK Behandlung alle 3-6 Monate

**BlancOne® CLICK** ist eine **supersanfte** Behandlung, mit **erschwinglichen Kosten für alle** und **kann deshalb häufig wiederholt werden**. Eine ideale Ergänzung für jede Dentalhygiene-Sitzung.



TOUCH

## Potenzierung

des Resultats mit der Intensivbehandlung TOUCH

**BlancOne® TOUCH** ist die **intensive Variante von CLICK** und basiert auf 3-4 Anwendungen während der gleichen Sitzung. **Eine sanfte und wirkungsvolle Aufhellungsbehandlung**, die für ein **tieferes und länger haltendes Weiß** sorgt.



HOME

## Kombination

mit der Behandlung für Zuhause HOME

indem **das sofortige Resultat von CLICK** mit der **weiteren Verbesserung und Stabilität** unserer **Behandlungsmethode mit Zahnschienen für Zuhause ergänzt wird**. HOME ist in **zwei Versionen** erhältlich **DAY (2 Stunden)** und **NIGHT (die gesamte Nacht)**.



XTRA

## Erhaltung

durch unser Behandlungsprogramm XTRA

BlancOne® XTRA kann mit jeder in der Praxis stattfindenden Behandlung kombiniert werden um die Effizienz und Stabilität durch **die synergische Wirkung zweier Behandlungen zu verlängern**:

- Die Zahnputzgels **DUETTO ACTIVE** und **DUETTO CARE**
- Den **Aufhellungsstick BlancOne® STICK**

Das Aufrechterhaltungsprogramm BlancOne® XTRA erstreckt sich über 3 Monate und kann wiederholt werden.



ULTRA

## Medizinische Aufhellungsbehandlung ULTRA

Für schwierigere Fälle und anspruchsvolle Patienten gibt es im BlancOne Sortiment die Aufhellungsbehandlung ULTRA, eine **medizinische Behandlung mit photochemischer Aktivierung, die mit 29%igem Wasserstoffperoxid arbeitet**.

**Zur Behandlung schwerer Dyschromien** wie z.B. durch Tetrazykline hervorgerufene Flecken geeignet, ist bei ULTRA der Schutz des Zahnfleisches erforderlich und es können bis zu 6 Zyklen während der gleichen Sitzung stattfinden, und wirklich erstaunliche Resultate erzielt werden.



*BlancOne® ULTRA ist eine medizinische Aufhellungsbehandlung (Richtlinie 93/42/CEE). In einigen Ländern der EU kann die Verwendung durch lokale Verordnungen eingeschränkt sein.*

IN DER PRAXIS

ZUHAUSE

# Photoaktivierungslampe BlancOne® ARCUS

Die technologische Innovation der BlancOne Verfahren wird erst durch die exklusive Lampe BlancOne® ARCUS möglich gemacht,

**die zahlreiche Vorteile bietet:**

- Die **BlancOne Behandlungen wurden optimiert, um** mit der **Lampe BlancOne Arcus** ihr Bestes zu geben.
- 10 leistungsstarke LEDs zu je 5 Watt sorgen für **maximale Effizienz** und die **kurzen** in den BlancOne Protokollen **angegebenen Zeiten**.
- Der ausgedehnte Bogen und die auch an den Enden angeordneten LEDs gewährleisten die **vollständige Aktivierung des Gels auf dem gesamten Bogen**, Seiten mit eingeschlossen.

BlancOne® ARCUS ist in zwei Versionen erhältlich:  
fahrbar auf Rädern und feststehend mit Verbindungsstück für den Behandlungseinheitsmasten.



## Die App BlancOne® PRO: ein leistungsstarkes Instrument **Das die Professionalität all Ihrer Behandlungen noch steigert**

- Einfach und schnell können Sie **jeden Patienten registrieren\*\*** sowie die Gewohnheiten, die die Effizienz der Behandlung beeinträchtigen könnten.
- **Sie können schnell und attraktiv zeigen**, in welchem Umfang **eine Verbesserung der Weißheitsstufe** möglich ist.
- Durch vorher und nachher geschossene Fotos **können Sie sofort das Ergebnis der vorgenommenen Behandlung zeigen**.
- Am Ende der Behandlung **gibt Ihnen die App an, wann ein Kontrollbesuch zu planen ist**.
- **Die App erinnert den Patienten** mit einer automatischen E-Mail daran, **wann er zum nächsten Check-up zurückkehren soll**.
- **Jeder Patient hat seinen eigenen, für ihn reservierten Online Bereich** mit den Daten und Fotos seiner Behandlungen.



Die App ist kostenlos und mit jeder BlancOne Behandlung nimmt der Wert Ihrer Praxis zu;  
jedes Mal, wenn Sie eine Behandlung vornehmen und mit der App den in jedes Set eingefügten Code scannen:

- Verdienen Sie **ein Guthaben hinzu, mit dem Sie kostenloses Werbematerial** für Ihre Praxis bekommen
- Verleihen Sie **Ihrer Praxis** auf der öffentlichen Internetseite [blancone.eu](http://blancone.eu) **mehr Visibilität**
- **Binden Sie Ihre Patienten** durch die Wiederholung der Behandlungen



\*\*Die mit der App BlancOne PRO gesammelten Daten werden in Anlehnung an die europäische Datenschutzrichtlinie GDPR gehandhabt.

# Werden Sie BlancOne® Center die Exzellenz in der Zahnaufhellung

Für BlancOne® Patienten ist dies nicht nur gleichbedeutend mit innovativ und sicher, sondern auch eine Garantie dafür, dass sie sich an ein **qualifiziertes Center** gewandt haben, so wie es von der Europäischen Richtlinie in puncto Zahnaufhellung vorgesehen ist. BlancOne® Center sind Zahnarztpraxen, die in der Zahnaufhellung spezialisiert und mit **innovativen Behandlungen und Instrumenten** ausgestattet sind, damit jedem Patienten ein **zufriedenstellendes Ergebnis** gewährleistet werden kann.

Neben der App BlancOne® PRO verfügen BlancOne® Center über viele weitere Vorteile:

- **Marketing Instrumente**, die Sie bei der Bekanntmachung Ihrer Aufhellungsbehandlungen unterstützen.
- **Persönlicher Bereich** mit nützlichen Instrumenten zur Weiterentwicklung Ihres Centers.
- **Den Patienten gewidmete Werbeaktionen**, White for Life Treueprogramme und Open Day Initiativen.
- **Social und Web Kanäle**, an denen Sie teilhaben und über die Sie viele neue Patienten gewinnen können.
- **Standortbestimmung der autorisierten BlancOne Center**, damit neue Patienten Sie auch finden können.

Als registriertes BlancOne® Center werden Ihnen geeignete Kommunikationsinstrumente zur Verfügung gestellt, **um Sie bei der Werbung für Aufhellungsbehandlungen zu unterstützen.**

Sie können das gesamte Marketing und Merchandising Material kostenlos erhalten und zwar indem Sie das durch die Verwendung der BlancOne® PRO App erzielte Guthaben nutzen.



## Neue Patienten Man sucht Sie...

BlancOne® Center zu werden ist leicht und kostenlos.

Registrieren Sie sich im professionellen Online Bereich oder laden Sie die App BlancOne® PRO herunter.



# Portfolio

## Aufhellungsbehandlungen

		Typologie Behandlungen	Wirkstoff	Protokoll	Typische Wirksamkeit	Empfohlene Häufigkeit	
<b>IN DER PRAXIS</b>	Schnelle Aufhellung	 CLICK	In der Praxis schnell	Carbamid-peroxid 16% (HP 5,6%)	1 Zyklus zu 10 Minuten*	4/5 Weißtöne	4/6 Mal pro Jahr
	Intensive Aufhellung	 TOUCH	In der Praxis Kosmetisch	Carbamid-peroxid 16% (HP 5,6%)	3 Zyklen zu 8 Minuten*	6/7 Weißtöne	1/2 Mal pro Jahr
		 ULTRA	In der Praxis Medizinisch	Wasserstoff-peroxid 29%	4-6 Zyklen zu 8 Minuten*	Bis zu 10 Weißtöne	1 Mal alle 1/2 Jahre
<b>ZUHAUSE</b>		 HOME DAY	Zuhause Tagsüber (mit Schiene)	Carbamid-peroxid 16% (HP 5,6%)	2-3 Stunden pro Tag Für 1/2 Wochen	1 Woche 4/5 Weißtöne	1 Woche 2/4 Mal pro Jahr
		 HOME NIGHT	Zuhause Nachts (mit Schiene)	Carbamid-peroxid 10% (HP 3,5%)	Die ganze Nacht Für 1/2 Wochen	2 Wochen 6/7 Weißtöne	2 Wochen 1/2 Mal pro Jahr
	Aufrechterhaltung	 XTRA	Programm Aufrechterhaltung 3 Monate	Carbamid-peroxid 16% (HP 5,6%)	Stick: für 4 Wochen** Duetto: täglicher Gebrauch	1/2 Weißtöne	2/4 Mal pro Jahr

\* Photoaktivierung mit der Aufhellungslampe BlancOne® Arcus

\*\* 2 anfängliche Wochen im ersten Monat + 1 Woche pro Monat in den darauffolgenden Monaten

# BLANCONE®

[www.blancone.eu/pro](http://www.blancone.eu/pro)  
[helpdesk@blancone.eu](mailto:helpdesk@blancone.eu)

 [blancone global](#)

 [blancone\\_ids](#)

 [blancone](#)

 [blancone team pro](#)



**BlancOne Deutschland**

Fa. Perfect White

Dieselstr. 5L

64807 Dieburg

Tel. 06071 – 92 98 110

Fax 06071 – 928 791

mail@blancone.de

BlancOne ist eine eingetragene Marke von IDS Spa

Rev 3 - 15/1/20